



Indispensable : masque lavable à usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS1)

Références : LTC-MDC-54198 & LTC-MDC-54199

selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 révisée le 26 avril

Avertissement : pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- **Un premier cycle d'entretien est requis avant 1^{er} usage (cf. Utilisation ci-dessous).**
- **Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- **Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.**
- **Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.**
- **Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.**
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au grand public et aux professionnels dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement et au déconfinement, et des gestes barrières.

Utilisation :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures consécutives maximum. Le masque ne doit pas être porté en position d'attente sur le front ou sur le menton pendant son port.

Avant la première utilisation, passer à la vapeur (fer à repasser sans appuyer sur le masque afin de gonfler la couche interne et de rétracter les fils élasthanne), laver et sécher le masque selon le cycle d'entretien présenté ci-après. La barrette métallique fournie est réutilisable (à retirer du masque lors des cycles d'entretien).

Entretien du masque avec un traitement à domicile : (sur la base de l'avis révisé de l'ANSM en date du 21 avril 2020)

- Lavage en machine dans un filet à linge avec un produit lessiviel classique dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Essorage à 1200 tours/min maximum. Après lavage, étirer le masque pour qu'il retrouve son aspect d'origine.
- Séchage conventionnel (à l'air libre en moins de 2 heures), suivi d'un repassage à la vapeur sans écraser le tissu sur les 2 faces à une température comprise entre 120° et 130° (entre les points 1 et 2 du fer à repasser).
- Ce masque a été conçu pour être lavé et réutilisé 30 fois.

Avertissement : Ne pas utiliser de sèche-linge.

Tournez svp

ILLUSTRATION DE LA NOTICE

PRÉPARATION


VIDÉO ILLUSTRATIVE
DE LA NOTIVE



ÉTAPE À RÉALISER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION UNIQUEMENT



Avant chaque manipulation du masque, lavez-vous les mains en respectant les préconisations gouvernementales.

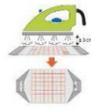

Avant la première utilisation, passer la vapeur du fer à repasser 2-3 cm au dessus du masque pour gonfler les fibres. Laver et sécher le masque selon le cycle d'entretien présenté ci-après.

ENTRETIEN


LAVAGE AVANT LA 1^{ÈRE} UTILISATION PUIS AVANT CHAQUE UTILISATION




Utiliser un filet à linge (afin notamment de limiter l'effilochage)



Lavage en machine avec un produit lessiviel classique dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30min à 60°C et un essorage maximum de 1200 tour /minute.

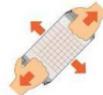

Étirer le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son séchage.

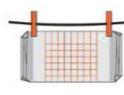

Laisser sécher à l'air libre. Le séchage doit durer moins de 2 heures.



Repasser délicatement, sans écraser le tissu, sur les 2 faces entre 120/130°C, c'est à dire entre les points 1 et 2 du fer à repasser.

PORT DU MASQUE



Repérer sur le côté en haut à droite du masque un angle au motif différent des autres. Il comporte une ouverture sur le côté dans laquelle vous pouvez insérer la barrette.



Saisissez le masque par les élastiques et placez le derrière chaque oreille. Ajustez sa position afin qu'il recouvre nez, bouche et menton.



Ajustez la barrette métallique du centre vers les extérieurs.



L'Indispenmasque doit être porté au maximum 4h et doit être changé dès que vous ressentez de l'humidité.



Retirer le masque en le tenant par les élastiques et le placer dans un sachet hermétique.